

Effektiv und schnell wirkende Flächendesinfektion

- 0 % Alkohol und pH-hautneutral
- Entfernt 99,99 % der Keime
Viren, Bakterien, Pilze und Sporen*
- VAH-gelistet
(bakterizid/levurozid)



- Gebrauchsfertige Flüssigkeit
zur Desinfektion von Flächen aller Art
in medizinischen Einrichtungen



Anwendungsgebiete

Geeignet für alle abwaschbaren Flächen in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie Praxen für Rehabilitation, Osteopathie und Physiotherapie.

Anwendung

Sprühen Sie 50 ml/m² saniXtreme aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf die zu desinfizierenden sauberen Oberflächen und Gegenstände bis diese vollständig benetzt sind. Lassen Sie das Produkt mindestens 30 Sekunden einwirken (siehe Tabelle zu den Einwirkzeiten). Rückstände können mit einem Tuch abgewischt werden.

saniXtreme verfügt für die bakterizide/levurozide Anwendung über eine VAH-Listung. Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich.



✓ PRODUKTVORTEILE

- » Beseitigt Viren, Bakterien, Pilze und Sporen sowie multiresistente Keime
- » Erzeugt keine Resistenzen
(Maillard et al. 2013 and Wesgate et al. 2016)
- » VAH-Listung
VAH-zertifiziert für die bakterizide/levurozide Anwendung
- » pH-hautneutral und von einem unabhängigen Institut dermatologisch getestet
- » Frei von Farb- und Duftstoffen
- » Wirkt geruchsneutralisierend
- » Anwendungssicheres Handling
saniXtreme ist frei von Alkohol. Da das Produkt nach CLP Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig ist und keine Gefahrstoffe enthält, sind keine arbeitschutzrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen.
- » Keine chemischen Rückstände nach Gebrauch
- » Kann ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen gelagert werden
- » Keine entzündbare Flüssigkeit
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



Wirkstoff

Aktivchlor, freigesetzt aus hypochloriger Säure 0,5 g/L

Materialverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Material-unverträglichkeiten zu erwarten.

Lagerung

saniXtreme im Originalbehälter an einem trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen 0 °C und 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Hinweis zur Verkehrsfähigkeit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Registrierungs-Nr.: N-88519

Gelistet in der VAH-Flächendesinfektionsmittel-Liste saniXTREME GmbH ist offizieller Wirkstoff- und Produkthersteller für den Wirkstoff „Aktivchlor, freigesetzt aus hypochloriger Säure“ gemäß Artikel 95 Listung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA).

Wirksamkeit *

Testverfahren	Einwirkzeit	Testkeime
DIN EN 1276 DIN EN 13697 DIN EN 13727 Bakterizid	1 Min.	<ul style="list-style-type: none"> » Escherichia coli (ATCC 10536) » Staphylococcus aureus (ATCC 6538) » Enterococcus hirae (ATCC 10541) » Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
DIN EN 1650 DIN EN 13624 Levurozid Fungizid	30 Sek. 1 Min.	<ul style="list-style-type: none"> » Candida albicans (ATCC 10231) » Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)
DIN EN 14476 Viruzid	1 Min.	<ul style="list-style-type: none"> » Adenovirus » murines Norovirus » Poliovirus
DIN EN 17126 Sporizid	1 Min. 15 Min.	<ul style="list-style-type: none"> » Bacillus subtilis (ATCC 6633) » Clostridium difficile (NCTC 13366) » Bacillus cereus (CIP 105151)

Verkaufseinheiten

Gebinde	Inhalt	Art. Nr.
Sprühflasche	250 ml	6200-DE
Sprühflasche	500 ml	6201-DE
Sprühflasche	1 L	6203-DE
Kanister	5 L	6204-DE
Kanister	10 L	6005-DE
IBC	1000 L	6211-DE

Sie haben Fragen?

📍 saniXTREME GmbH
Kaiserstraße 68/70
55232 Alzey

✉ info@sanixtreme.com
☎ +49 (0) 6731 89988-0
☎ +49 (0) 6731 89988-11
🌐 www.sanixtreme.com



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

