

## Effektiv und schnell wirkende Flächendesinfektion

- 0 % Alkohol und pH-hautneutral
- Entfernt 99,99 % der Keime  
Viren, Bakterien, Pilze und Sporen\*
- VAH-gelistet  
(bakterizid/levurozid)



- Gebrauchsfertige Flüssigkeit  
zur Desinfektion von Flächen aller Art  
in medizinischen Einrichtungen



### Anwendungsgebiete

Geeignet für alle abwaschbaren Flächen in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie Praxen für Rehabilitation, Osteopathie und Physiotherapie.

### Anwendung

Sprühen Sie 50 ml/m<sup>2</sup> saniXtreme MEDICAL aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf die zu desinfizierenden sauberen Oberflächen und Gegenstände bis diese vollständig benetzt sind. Lassen Sie das Produkt mindestens 30 Sekunden einwirken (siehe Tabelle zu den Einwirkzeiten). Rückstände können mit einem Tuch abgewischt werden.

saniXtreme MEDICAL verfügt für die bakterizide/levurozide Anwendung über eine VAH-Listung. Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich.

### ✓ PRODUKTVORTEILE

- » Beseitigt zuverlässig Viren, Bakterien, Pilze und Sporen sowie multiresistente Keime
- » Erzeugt keine Resistenzen  
(Maillard et al. 2013 and Wesgate et al. 2016)
- » VAH-Listung  
VAH-zertifiziert für die bakterizide/levurozide Anwendung
- » Zur Vorbeugung gegen Infektionen geeignet, um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu steigern
- » pH-hautneutral, hypoallergen und von einem unabhängigen Institut dermatologisch getestet
- » Frei von Alkohol, Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen sowie Tensiden
- » Wirkt geruchsneutralisierend
- » Anwendungssicheres Handling  
saniXtreme ist nach CLP Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig und enthält keine Gefahrstoffe, weshalb keine arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen sind.
- » Keine chemischen Rückstände nach Gebrauch
- » Kann ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen gelagert werden
- » Keine entzündbare Flüssigkeit  
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



### Wirkstoff

Aktivchlor, freigesetzt aus hypochloriger Säure 0,5 g/L

### Materialverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Material-unverträglichkeiten zu erwarten.

### Lagerung

saniXtreme MEDICAL im Originalbehälter an einem trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen 0 °C und 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Entsorgung

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Hinweis zur Verkehrsfähigkeit

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Registrierungs-Nr.: N-88519

Gelistet in der VAH-Flächendesinfektionsmittel-Liste  
saniXTREME GmbH ist offizieller Wirkstoff- und Produkthersteller für den Wirkstoff „Aktivchlor, freigesetzt aus hypochloriger Säure“ gemäß Artikel 95 Listung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA).

### Wirksamkeit \*

Testverfahren	Einwirkzeit	Testkeime
<b>DIN EN 1276</b> <b>DIN EN 13697</b> <b>DIN EN 13727</b> Bakterizid	1 Min.	» Escherichia coli (ATCC 10536) » Staphylococcus aureus (ATCC 6538) » Enterococcus hirae (ATCC 10541) » Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
<b>DIN EN 1650</b> <b>DIN EN 13624</b> Levurozid Fungizid	30 Sek. 1 Min.	» Candida albicans (ATCC 10231) » Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404)
<b>DIN EN 14476</b> Viruzid	1 Min.	» Adenovirus » murines Norovirus » Poliovirus
<b>DIN EN 17126</b> Sporizid	1 Min. 15 Min.	» Bacillus subtilis (ATCC 6633) » Clostridium difficile (NCTC 13366) » Bacillus cereus (CIP 105151)

### Verkaufseinheiten

Gebinde	Inhalt	Art. Nr.
Sprühflasche	500 ml	6201-DE
Sprühflasche	1 L	6203-DE
Kanister	5 L	6204-DE
Kanister	10 L	6005-DE
IBC	1000 L	6211-DE



### Sie haben Fragen?

✉ info@sanixtreme.com  
🌐 www.sanixtreme.com

☎ +49 (0) 6731 89988-0  
📠 +49 (0) 6731 89988-11

📍 saniXTREME GmbH  
Kaiserstraße 68/70  
55232 Alzey